

# ALCOSCAN Alcoholímetro ALP-1

Un Alcoholímetro que combina la alta tecnología,  
funcionalidad y durabilidad necesaria para pruebas de desempeño.

**1er Alcoholímetro Profesional**  
de Celda de Combustible con  
Sensor Intercambiable.



**ALCOSCAN**

**SENTECH**



## Acerca de Sentech Korea Corp.

Sentech Korea Corp. ha diseñado un alcoholímetro que proporciona una durabilidad y precisión excelente. Sentech, ha desarrollado alcoholímetros que cuentan con estrictas certificaciones internacionales tales como UL, CE, DOT y FDA, haciendo de su marca el producto No. 1 en el mundo. ALP-1 es el equipo más avanzado de Sentech para uso profesional.

## Alcoholímetro ALP-1



ALP-1 es un alcoholímetro con alta tecnología que opera mediante un sensor de celda de combustible. ALP-1 es el alcoholímetro profesional altamente-mejorado que permite medir alcohol en diferentes modos de prueba. Funciona con el sensor rápido en el mercado y alta precisión tanto para niveles bajos, medios y altos de alcohol. El resultado de la prueba puede almacenarse en el alcoholímetro Alcoscan ALP-1, así como imprimirse a través de una impresora móvil via Bluetooth.

## Características del Alcoholímetro



Fácil de Operar



Conveniente



Conexión a USB



Sonido de Alerta



Bluetooth

## Ventajas y Beneficios

- No requiere calibración, su sensor de celda de combustible se puede intercambiar al requerir calibración ya que es fácil de reemplazar.
- Sensor de presión que evita cualquier intento de manipulación y brinda resultados más precisos al hacer un análisis oportuno.
- Permite 3 diferentes modos de prueba: Normal, Rápido y Pasivo.
- Cuenta con memoria interna para almacenaje de hasta 500 pruebas.
- Descarga de pruebas a PC, mediante software y Cable USB incluido.



## Modo de Empleo




1 Presione el botón de encendido.



2 Esperar hasta que pueda ver el letrero de "soplado" y escuche un pitido.



3 Inserte la boquilla en el puerto en la parte superior del dispositivo de forma segura escuchando un clic.

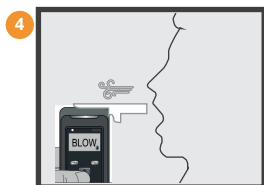

4 Sopla a través de la boquilla en la unidad durante 3 segundos hasta que los pitidos concluyan.



5 Después de tomar su muestra de aliento, la pantalla muestra "Analizar".



6 El resultado se muestra y se escucha un pitido. El resultado de la prueba se muestra con dígitos (prueba cuantitativa) durante 15 segundos.

## Información para Pedidos

Catálogo	Producto	Contenido
ALP-1 BT KIT	Alcoholímetro ALP-1	Alcoholímetro Alcoscan, estuche de plástico, 5 Boquilla, 1 Boquilla para pruebas Rápidas, 2 pilas alcalinas tamaño AA, 1 correa de mano, 1 bolsa, 1 MAX30 CD (Software), cable conectable por PC, manual de usuario.
ImpBT-ALP1	Impresora BT	1 Impresora
MP1	Boquilla	100 piezas