

Ideal para Circuncisiones, Transfusiones,
Cirugías Menores, Rayos "X", Vías
Intravenosas del Cuero Cabelludo
u Otros Procedimientos



Versátil y Fácil de usar

- Forma moldeada cómoda que levanta las caderas y presenta los genitales para procedimientos
- Perfecto para rayos "x" – minimiza el movimiento, sin artefactos
- Contorno de cabeza moldeado que expone el cuero cabelludo para vías intravenosas
- Correas cómodas y ajustables que sujetan al infante de manera segura en los codos y rodillas
- Construcción de plástico durable que garantiza años de uso
- Diseño de peso ligero y compacto que permite el fácil manejo, almacenamiento y limpieza



Probado durante muchos años, el dispositivo Circumstraint se ha vuelto la norma de inmovilización de infantes para los cuneros modernos.

Introducido por primera vez en 1959, el dispositivo Olympic Circumstraint ha sido comprado por más de 11,000 hospitales en todo el mundo. La unidad Circumstraint compacta, siempre un mecanismo rápido y fácil para inmovilizar a recién nacidos para circuncisiones, se ajusta dentro de una incubadora estándar o cuna y es útil para una gran variedad de procedimientos. La unidad Circumstraint puede usarse para cirugías menores, intercambios de sangre, cateterización, transfusiones o infusiones (incluyendo intravenosos del cuero cabelludo), o siempre que se requiera de la inmovilización para un procedimiento neonatal. También funciona muy bien con rayos "x", debido a que es radiotransparente y sujeta al infante muy firmemente con movimiento mínimo.

En menos de 30 segundos, una enfermera puede inmovilizar a un infante firmemente en la posición correcta con el dispositivo Circumstraint. Las correas suaves, de Velcro® ancho rodean los codos y las rodillas del infante, garantizando una inmovilización segura y firme. La forma contorneada cómoda de la unidad Circumstraint coloca al infante, con la cadera elevada, presentando eficazmente los genitales para el procedimiento de circuncisión. La plataforma entre las piernas del infante proporciona soporte para una pinza de circuncisión. Sin sujetadores, pinzas o toallas extraños, el dispositivo inmoviliza cómodamente y firmemente al infante con todo el torso visible.

El dispositivo Circumstraint se ajusta a infantes desde 1800 gramos hasta 4500 gramos. Las correas cómodas y ajustables se adaptan al tamaño del infante, mientras que los cierres de Velcro se ajustan fácilmente a la circunferencia de la extremidad. El dispositivo mantiene los estándares de altura de asepsis del cunero con un esfuerzo mínimo. La unidad Circumstraint está construida de plástico denso, suave, no absorbente y se limpia con una toalla húmeda con desinfectante líquido. Sus correas de Velcro de nylon secan rápidamente, y se les puede realizar el autoclave en lavadora, con vapor o gas, o pasteurizarse. El dispositivo es muy económico, debido a que permite que la enfermera inmovilice rápidamente a un infante en la posición adecuada, acelerando los procedimientos y ahorrando tiempo valioso. Excepcionalmente durable, el Circumstraint proporciona años de servicio, incluso con uso a largo plazo. Probado durante muchos años, el Circumstraint se ha vuelto la norma de inmovilización de los infantes para los cuneros modernos.



Un Año de Garantía: El dispositivo Olympic Circumstraint está totalmente garantizado por un año.

Olympic Circumstraint CAT. NO. 50100, ships with VELCRO straps included

Especificaciones e Información para Realizar Pedidos

Ligero, compacto y fácil de colgar o almacenar en la Sala de Operaciones o la enfermería. Varias unidades Circumstraint pueden sobreponerse apiladas en una repisa.

Dimensiones: 25¼" x 13" x 3½" (64.5 cm x 33 cm x 8.9 cm)

Peso: Menos de 2 libras (0.9 kg)

Inmovilizador de Recién Nacidos Circumstraint

Completo con correas.

CATALOGO. NO. 50100

Juego de Correas de Reemplazo Regular

Juego de 8 correas: Cuatro correas de brazo de 8" (20.3 cm) y cuatro correas de pierna de 10" (25.4 cm).

CATALOGO. NO. 50108

Juego de Correas de Reemplazo para Piernas Más Largas

Juego de 8 correas: Cuatro correas de brazo de 8" (20.3 cm) y cuatro correas de pierna de 13" (33 cm).

CATALOGO. NO. 50109

natus.

Natus Medical Incorporated

1501 Industrial Road
San Carlos, CA 94070 USA
1-800-303-0306
+1-650-802-0400
www.natus.com

© 2012 Natus Medical Incorporated. All Rights Reserved. All product names appearing on this document are trademarks or registered trademarks owned, licensed to, promoted or distributed by Natus Medical Incorporated, its subsidiaries or affiliates.

VELCRO® is a registered trademark of Velcro Industries B. V.