

Physio®

Unidad portatil de electroterapia

4 categorías de programación estándar:

- Rehabilitación I •
- Alivio del Dolor I •
- Acondicionamiento I •
- Vascular •

4 categorías de programación completa

- Rehabilitación II •
- Alivio del Dolor II •
- Acondicionamiento II •
- Neurorehabilitación •

3 categorías de configuración optima

- Incontinencia •
- Denervación •
- Corriente directa •

Crea y personaliza programas

Botón *i*
Ajusta la intensidad en varios canales a la vez

Función 2+2
(Combinación de dos programas o 2 pacientes o 2 partes del cuerpo)

73 programas

Para tratar todas las indicaciones de la electroterapia

Tecnología exclusiva
Muscle Intelligence™
4 Mi-cables incluidos

Autonomía de uso diario y rápida velocidad de carga de la batería

4 canales de electroestimulación

Software es español

Incluye lápiz para localizar punto motor



Physio® es un estimulador completo de 4 canales desarrollado para manejar todas las indicaciones de electroterapia: Estándar (TENS/NMES), Completa (Neurología, LCA), Lumbalgia, Cervicalgia, etc. y músculos Denervados, Hiperhidrosis, Urología o prevención de edemas. Tiene la posibilidad de crear y personalizar programas con los parámetros de cada paciente.

Programas

REHABILITACIÓN I	ANTIDOLOR I	VASCULAR	PREPARACIÓN FÍSICA I
Tratamiento de la amiotrofia	TENS (gate control) 100 Hz	Piernas pesadas	Resistencia
Fortalecimiento	TENS frec. Modulada	Insuficiencia venosa I	Fuerza
Prevención de la amiotrofia	TENS mod. ancho. imp.	Insuficiencia venosa II	Recuperación activa
Lesión muscular	Endorfinico	Insuficiencia arterial I	
Punto motor	Burst	Insuficiencia arterial II	
	TENS burst alt.	Prevención de calambres	
	Descontracturante	Capilarización	

REHABILITACIÓN II	ANTIDOLOR II	PROGRAMAS PARA HEMOFÍLICOS	PREPARACIÓN FÍSICA II
Prótesis de cadera	TENS (gate control) 80Hz	Atrofia	Potenciación
Síndrome rotuliano	Dolor de rodilla	Fortalecimiento	Resistencia aeróbica
LCA	Dolor de trapecio		Fuerza explosiva
Manguito rotador	Dolor de hombro	REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA	Pliometría
Estabilización lumbar	Dolor por fractura	Pie hemipléjico	Hipertrofia
Rehabilitación cardíaca	Cervicalgia	Espasticidad	Musculación
Atrofia (frecuencia modulada)	Dorsalgia	Hombro hemipléjico	Fortalecimiento zona lumbar
Fortalecimiento (frecuencia modulada)	Lumbalgia	Neurorehabilitación	Estabilización cintura pélvica
	Lumbociatalgia		Recuperación plus
	Lumbago	AGONISTA -ANTAGONISTA	Masaje tonificante
	Epicondilitis	Atrofia	Masaje relajante
	Tortícolis	Fortalecimiento	Masaje anti-stress
	Artralgia		

INCONTINENCIA	DENERVACIÓN	CORRIENTE DIRECTA
Por Estrés	Parcial	Edema
Urgencia	Total	Hiperhidrosis
Mixta	Automática	
Prevención Postparto	Manual	

Características	
Corriente constante:	Resistencia máxima de 1300 Ohm por canal
Máxima intensidad de pulso:	120 mA
Ancho de pulso:	30 a 400 µs
Frecuencia de pulso:	1 a 150 Hz

Tecnología MI-Muscle Intelligence™

4 funciones disponibles en los 4 canales:

- **Mi-Scan** - Personaliza la estimulación según la fisiología del paciente para una mayor comodidad y efectividad del tratamiento.
- **Mi-TENS** - Actúa de forma efectiva justo por debajo del umbral motor para programas TENS.
- **Mi-Range** - Actúa de forma efectiva en el rango de intensidad óptima para los programas de baja frecuencia.
- **Mi- Action** - Sesión activa con una contracción voluntaria detectada por el sensor para iniciar la estimulación.

Función de Disparo


Comienza la estimulación a demanda presionando el botón de disparo cuando sea necesario.

Función 2+2, PROGRAMA + TENS

Se puede escoger un programa para el canal 1 y 2, después seleccionar otro de la lista de programas 2+2 para el canal 3 y 4. Esto permite el tratamiento de dos partes diferentes del cuerpo, o dos pacientes al mismo tiempo.

	Músculo denervado	Iontoforensis Hiperhidrosis	Edema
Forma de onda:	Compensada rectangular o triangular	Corriente continua	Corriente rectangular no compensada
Máxima intensidad de pulso:	30 mA	20 mA	
Incremento mínimo de intensidad:	0.25 mA	0.125 mA	1 mA
Ancho de pulso:	10µs - 1000µs		150µs
Frecuencia de pulso:	1/30 Hz - 10 Hz		120 Hz

Formas de Onda

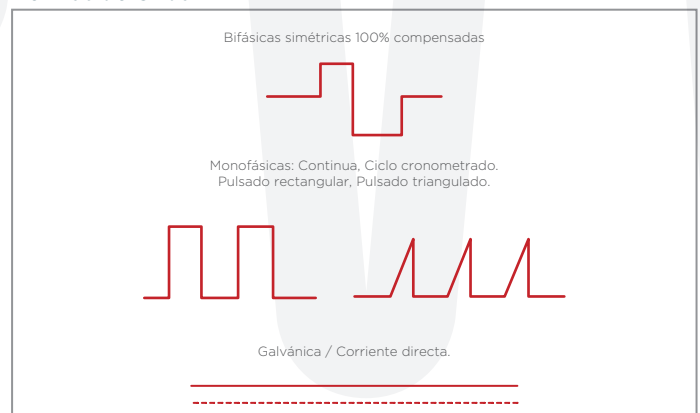

777 317 7035 / 777 317 7036

777 253 9743 / 777 233 7314

equipos@interferenciales.com.mx

www.interferenciales.com.mx

@interferencialesmx

InterferencialesMX

/interferenciales