

CAMILLAS DE TRATAMIENTO



CAMILLA DE TRATAMIENTO DE 3 SECCIONES

CY-C108F



CAMILLA DE TRATAMIENTO DE 3 SECCIONES

La camilla de tratamiento **CY-C108F** ha sido diseñada para brindar máximo **confort** al paciente y **ergonomía** al terapeuta, asegurando sesiones de **terapia seguras, funcionales y profesionales**.

Su **ajuste eléctrico de altura**, controlado cómodamente desde el pie del operador, junto con sus secciones regulables mediante **sistema neumático** y su movilidad garantizada por ruedas médicas con seguro de bloqueo, permite **adaptarse de manera versátil a distintos entornos clínicos**, desde consultorios privados hasta hospitales de alta demanda.

Características principales

- Ajuste rápido y seguro de respaldo y reposa pies mediante doble pistón neumático.
- Tapicería médica premium en PVC vinílico: ignífuga, impermeable, resistente a manchas, moho, aceites y desgaste.
- Equipada con un sistema de ruedas médicas retráctiles de grado hospitalario con seguro de bloqueo.
- 4 patas de altura ajustables para nivelación.



Dimensiones y funciones

- **Altura ajustable:** 460–890 mm mediante 1 actuador eléctrico con sistema de pedal en pie
- **Respaldo ajustable:** 78° a –32°
- **Sección de pies ajustable:** 45° a –25°
- **Capacidad de peso:** 250 kg / 551 lbs (incluye paciente y accesorios)

Peso y embalaje

- **Medidas:** 198 × 70 × (46-89) cm
- **Peso neto:** 70 kg

Advertencias de Seguridad

- No colocar manos ni pies en partes móviles durante el ajuste.
- No ajustar secciones mientras el paciente esté sobre la mesa.
- Mantener la mesa nivelada antes de su uso.
- No exponer a humedad o temperaturas extremas.
- No usar el sistema de ruedas durante el tratamiento.

Mantenimiento y cuidado

- Evitar exposición directa al sol para preservar el material.
- No usar alcohol para limpieza.
- Mantener el actuador eléctrico seco.

